

Lampa na podczerwień Lofti



Symbol

Lofti

Opis

Lampa na podczerwień Lofti to niezwykle skuteczne urządzenie, które po prostu musisz mieć! Światło podczerwone może zdziałać cuda dla ludzkiego ciała. **Lampa Lofti** rozgrzewa powierzchnię ciała i tkankę skórą, **rozszerzając naczynia krwionośne** oraz **zwiększając przepływ krwi i limfy**. W efekcie **zwiększa metabolizm** i **przyspiesza usuwanie toksycznych substancji** z organizmu. Pomaga również **przyspieszyć krążenie krwi** i promować **rozluźnienie mięśni**. Terapia światłem podczerwonym jest szeroko stosowana w **dermatologii**, ponieważ nie tylko **poprawia jakość skóry**, ale także pomaga eliminować zmarszczki, usuwać niedoskonałości skóry i przyspieszać poprawę skóry problematycznej.

Jak używać

Umieść lampę w **odległości około 30 do 60 centymetrów (według własnego odczucia)** od ciała. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, odsuń lampę dalej. **Nowi użytkownicy powinni ustawić natężenie i czas naświetlania na najniższym poziomie**. Używaj urządzenia codziennie, aby osiągnąć widoczne rezultaty. Używaj nie więcej niż **dwa razy dziennie** i nie dłużej niż 40 minut na raz. Żarówkę podczerwieni należy umieścić w odległości co najmniej **1 metra od przedmiotów łatwopalnych**.

Opis techniczny:

- Rewolucyjne urządzenie, które pomaga **złagodzić ból mięśni i stawów** (nawet tych z reumatyzmem)
- Wspomaga gojenie się ran
- Poprawia kondycję skóry
- Wysokiej jakości żarówka ze **szkła hartowanego**
- Terapia suchym ciepłem
- Długości fal światła wnikają w skórę
- Bezbolesna aplikacja
- Łatwa w użyciu
- Regulowany kąt
- **4 poziomy natężenia światła**
- Zegar (10/30/40 minut)
- **Moc: 100 W / 150 W**

- **Długości fal świetlnych:** 580 nm – 1400 nm
- **Wymiary:** wys. 18 x szer. 12 x dł. 18 cm
- **Waga:** 370 g